

## A. Réglage du ressort gaz




### Matériel :

- tournevis plat
- clé n° 17 (x2)
- pince multiprise
- un chiffon



Utiliser une protection (chiffon, carton,...) lors du desserrage et du serrage de la pince multiprise sur la tige vérin.

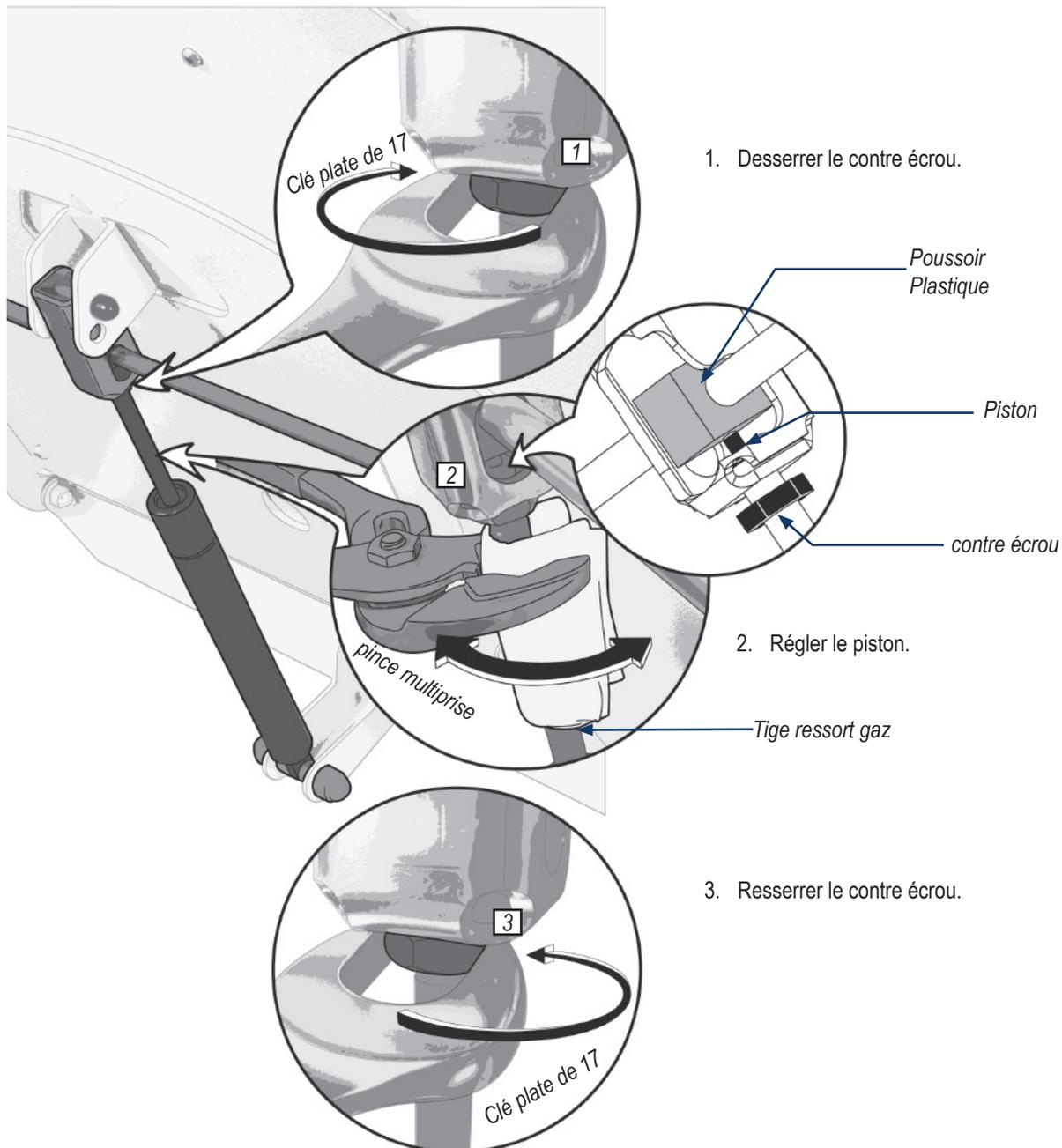

## B. Remplacement du ressort gaz



### Matériel :

- tournevis plat
- clé n° 17 (x2)
- pince multiprise
- un chiffon

### Pièces de rechange SAV :

- ressort gaz (RES5600)
- écrou frein (ECX4010)


(Cf. éclaté technique, page 51)

(Cf. nomenclature, pages 57 et 58)




1. Desserrer le contre écrou de la tige du ressort gaz.


2. Retirer les caches écrou, puis démonter l'axe inférieur.

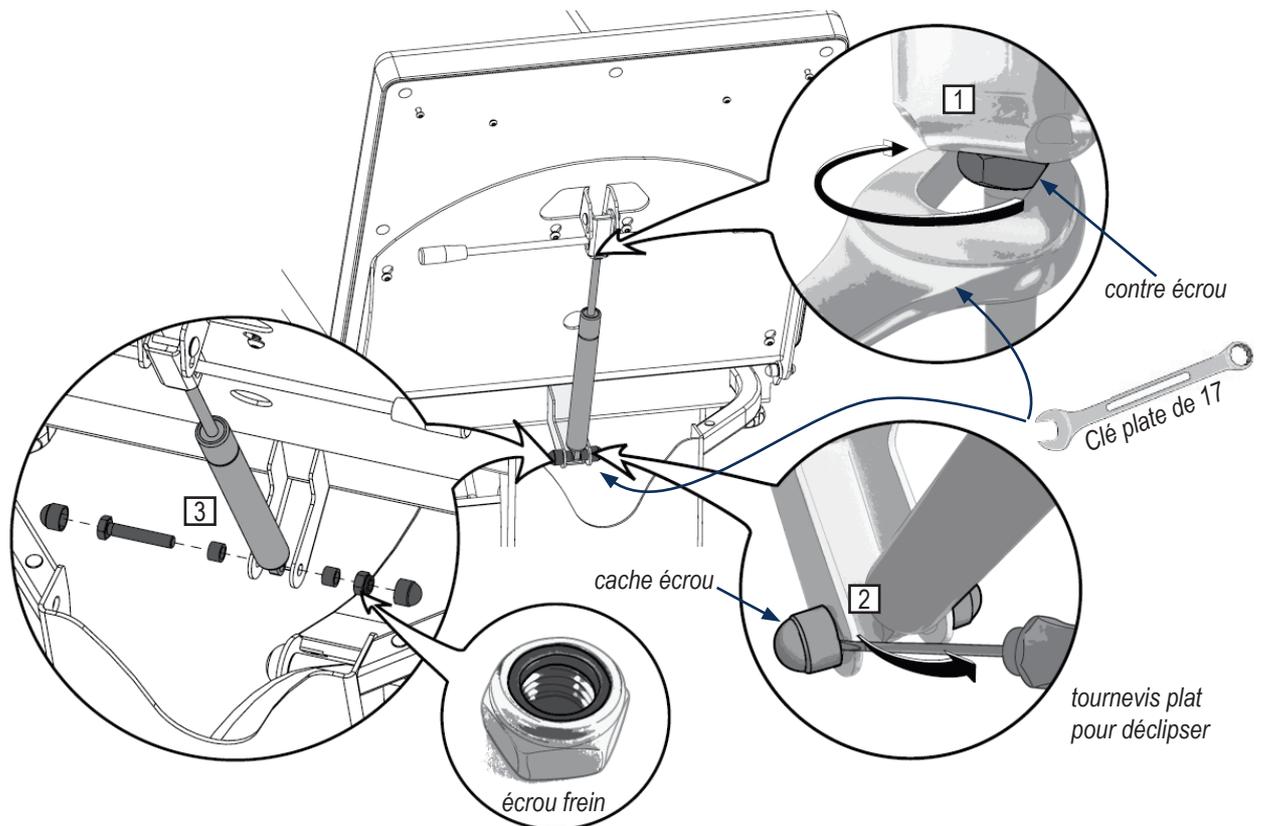


3. Dévisser le ressort gaz.

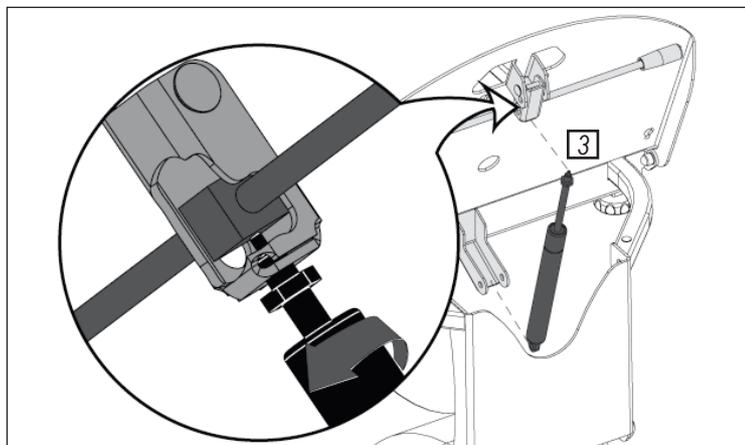

4. Visser le nouveau ressort gaz en amenant le piston (P) en contact sur le poussoir (C).  
Dévisser d'1/4 de tour et serrer le contre écrou.

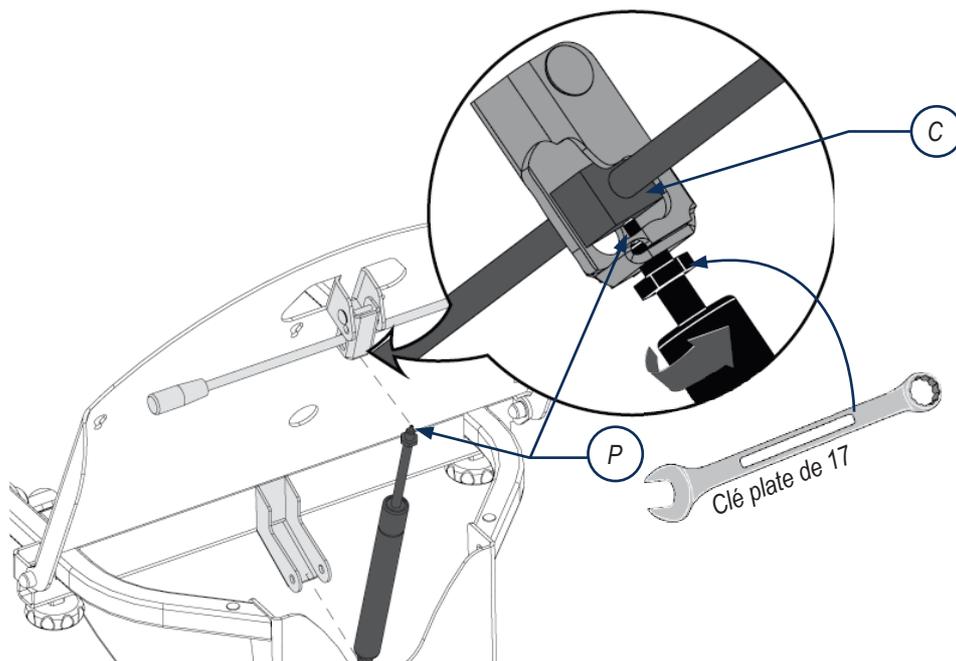

5. Remonter l'axe inférieur.

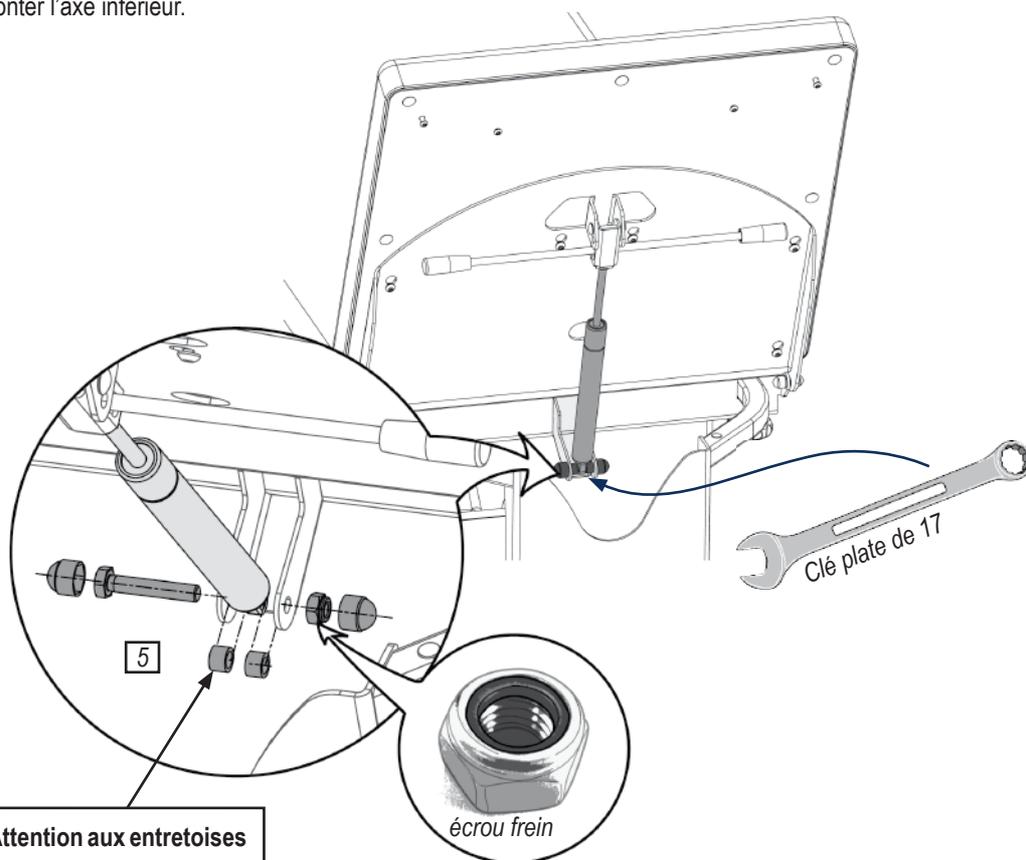

**⚠ Attention aux entretoises**

**⚠ Utiliser l'écrou frein livré avec le ressort gaz.**