

| PROBLÈMES | ACTIONS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La table est bloquée, le voyant vert de mise sous tension de la Pédale / Télécommande est éteint | 1/ Contrôler le branchement du Divan / Fauteuil sur le secteur 2/ Contrôler le bon fonctionnement du Réseau EDF 3/ Contrôler l'état du câble d'alimentation 4/ Contrôler les connexions sur le boîtier électrique (cf. action 4 détaillée ci-dessous) |
| La table est bloquée, le voyant vert de mise sous tension de la Pédale / Télécommande est allumé, les colonnes bipent lorsqu'on appui sur les touches de la Pédale / Télécommande | 4/ Contrôler les connexions sur le boîtier électrique (cf. action 4 détaillée ci-dessous) |
| La table est bloquée, Le voyant vert de mise sous tension de la Pédale / Télécommande est allumé | 4/ Contrôler les connexions sur le boîtier électrique (cf. action 4 détaillée ci-dessous) |
| Les colonnes ne sont pas synchrones | 4/ Contrôler les connexions sur le boîtier électrique (cf. action 4 détaillée ci-dessous) |

ACTION 4 DÉTAILLÉE

1/ Débrancher le Divan / Fauteuil du secteur EDF et attendre 2min

2/ Rebrancher le Divan / Fauteuil – Faire un essai, si toujours bloqué, poursuivre l'étape 4/.

3/ Si les colonnes peuvent bouger, faites monter les colonnes en position levée au maximum.

Appuyer simultanément sur les 2 touches du haut de la télécommande manuelle.


Après 10 secondes, les colonnes se baissent jusqu'à la position définie comme « zéro » ou position « reset ».

A la fin de ce mouvement, un signal sonore vous informe que le système est initialisé. Dès lors les 2 vérins/colonnes doivent fonctionner de façon synchronisée.

Si toujours bloqué, poursuivre à l'étape 4/.


ACTION 4 DÉTAILLÉE

4/ Débrancher le Divan / Fauteuil .
Démonter le capot (partie 1) du pied (partie 2) .
Passer la main sous le pied.
Soulever le capot vers le haut, défaire les scratches et retirer le capot des côtés

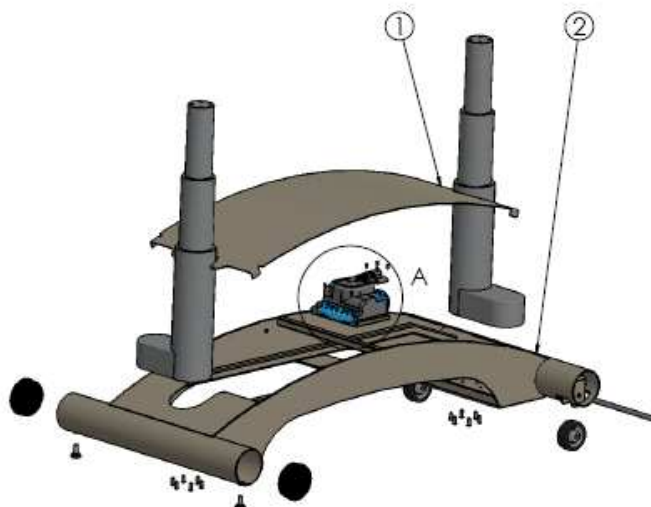

5/ Enlever le cache de sécurité du boîtier de contrôle.
Déclipser les 3 languettes puis retirer la façade avant.

Retirer les 3 languettes
Puis retirer la façade avant du cache

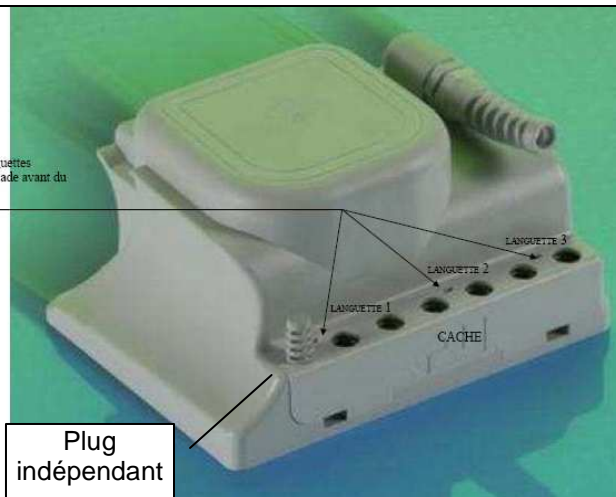

6/ Déconnecter toutes les fiches du boîtier, **attention à l'ordre**. Colonnes, pédale et/ou télécommande, vérin électrique, plug indépendant.

7/ Remettre sous tension (rebrancher le 220V) le Divan / Fauteuil – Attendre 1 min

8/ Débrancher le secteur – Attendre 1 min

9/ Reconnecter toutes les fiches sur le boîtier **dans l'ordre**

10/ Repositionner le cache de sécurité

11/ Remettre le capot

12/ Rebrancher le secteur (220V)

Après toutes ces manipulations, si le problème persiste, nous recontacter et nous envisagerons le remplacement de l'ensemble électrique (colonnes, boîtier, pédale / télécommande)