



MODE D'EMPLOI IONOMAT 1

**AED, 5 RUE DES GENETS
LA PLANE 34260 LA TOUR SUR ORB**

TEL 04 67 23 78 73


FAX 04 67 23 79 23

contact@ionomat.com



1014

3IS1du 01/02/14

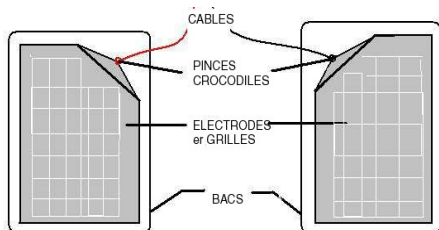

VOTRE APPAREIL ARRIVE, DANS LA BOITE VOUS DEVEZ TROUVER :

Le générateur, 2 bacs et deux grilles, 2 électrodes (tôles), 2 câbles avec pinces crocodile, 2 électrodes aisselles et la valise, si vous les avez commandées.



Bacs




Câbles avec pinces




Electrodes



Grilles

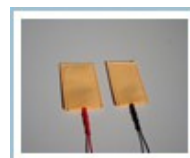

Option Électrodes aisselles

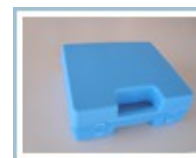

Option valise

TRAITEMENT DES MAINS :

-Disposez sur une table : le générateur au milieu

- à gauche 1 bac avec électrode recouverte de la grille
- à droite l'autre bac avec électrode recouverte de la grille

-Branchez le générateur, le voyant vert s'allume et vous lisez 00.0

-Versez de l'eau du robinet dans chaque bac pour bien couvrir les doigts

-Installez-vous confortablement sur une chaise devant une table basse

-Réglez le courant à la valeur supportée (bouton A), par exemple 15 mA, voir tableau des valeurs recommandées


-Tournez le bouton de droite (B) sur " IONO 20 " et mettez vos mains dans l'eau.

Au bout de 10 secondes, le courant monte lentement puis se stabilise. Il s'annule au bout de 10 minutes puis recroît lentement inversé (affichage négatif exemple : -15)

-Au bout de 20 minutes l'appareil sonne, vous pouvez alors retirer vos mains et arrêter la sonnerie en positionnant le bouton de droite sur 0.


A tout moment vous pouvez retirer la main de l'eau doucement en finissant par la paume.

Si les résultats sont insuffisamment rapides passez en IONO 30.

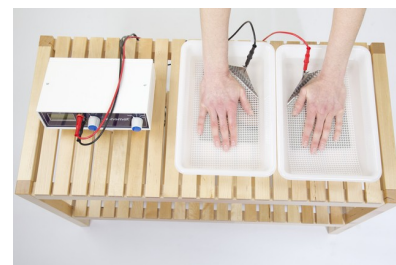

TRAITEMENT DES PIEDS :

Procédez de la même façon que les mains, mettez les bacs sur le sol, puis les pieds dans l'eau réglez le courant sur une valeur plus forte, par exemple 20 mA (voir tableau des valeurs recommandées)

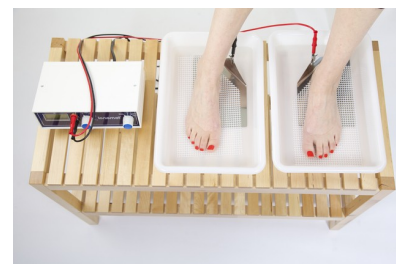

FREQUENCE DES SEANCES :

En traitement d'attaque **3 à 5 séances** la première semaine, ensuite 2 séances par semaine pendant 4 semaines et 1 séance d'entretien par semaine toute l'année.


Tableau Des Valeurs Recommandées :

	ENFANTS	FEMMES	HOMMES
MAINS	2 à 8 mA	5 à 22 mA	8 à 25 mA
PIEDS	5 à 10 mA	8 à 25 mA	12 à 25 mA
AISELLES	2 à 5 mA	4 à 5 mA	4 à 6 mA

TRAITEMENT DES AISSELLES :

Branchez les pinces crocodile sur le petit côté des électrodes spéciales, enfiler les dans les éponges mouillées abondamment et faites les tenir sous les bras horizontalement en laissant bien dépasser la pince crocodile qui ne doit pas toucher la peau, éventuellement tordre la tôle pour l'adapter à votre morphologie ,en la cintrant elle va traiter le creux axillaire .

Mettre le bouton de droite sur « iono » et augmenter progressivement pour lire 3 à 6 sur l'affichage, un courant plus grand peut donner de petites brûlures qui guérissent spontanément.

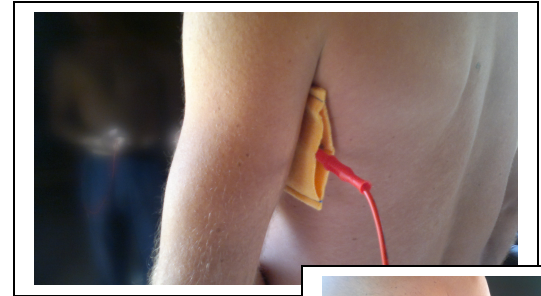

TRAITEMENT DES VERRUES :

Approvisionner du salicylate de sodium en poudre, disponible sur notre site par 100 gr

Ajouter une cuiller à soupe de salicylate de sodium dans l'eau du côté verrue main ou pied sur l'électrode branchée sur le câble rouge, mettre l'autre main ou pied dans de l'eau ordinaire, utiliser la position VERRUE du bouton B.

Régler le courant suivant le tableau en ionophorèse et faire 2 séances par semaine jusqu'à disparition totale de ou des verrues, la peau doit être nette. Bien désinfecter bacs, grilles et électrodes avec de l'eau de Javel après chaque séance pour éliminer les virus.

CONTRE INDICATIONS :

Les contre-indications retenues par principe de précaution sont la grossesse, les pacemakers et les prothèses [orthopédiques](#) : protéger les blessures avec de la vaseline ainsi que l'endroit où s'arrête l'eau si nécessaire enlever les bagues.

Entretien :

- Sécher les électrodes et les bacs,
- Désinfecter toutes les 10 séances les bacs et les grilles et les tôles avec de l'eau de Javel diluée
- Rénover avec un tampon à récurer la vaisselle tous les mois chaque électrode afin qu'elle reste brillante
- Ne jamais mettre les câbles dans l'eau ou un produit désinfectant.

Rangement des accessoires dans la valise, (option qu'IONOMAT 1)

- Placer les tôles au fond de la valise, avec les coins pliés vers le haut et vers l'avant.
- Poser par-dessus les bacs
- Placer les grilles plastique au fond des bacs.
- Placer le générateur dans les bacs et entourer les bacs avec le câble secteur et les câbles pour les électrodes

EN CAS DE PROBLEMES

LES SOLUTIONS

Le générateur ne présente pas d'affichage et le petit voyant vert ne s'allume pas	Vérifier l'alimentation secteur.
Le générateur indique sur l'affichage : low battery	La tension secteur est insuffisante, par exemple le secteur des USA Canada 110V, utiliser alors un petit transformateur 110v/230v 10VA ou plus (disponible sur notre site)
Tout est branché correctement mais on lit 00.0 sur l'affichage. En cas de doute : Test de l'appareil	Il manque une extrémité dans l'eau, par exemple une seule main est dans l'eau, les mains dans l'eau doivent être celles d'une seule personne. Relier directement les 2 pinces crocodile l'une sur l'autre sur 10 mA, observer un cycle complet
Mes mains de viennent toute rouges et me démangent	Le courant est trop élevé
Je n'ai pas d'efficacité	Le courant est trop faible (augmentez le courant et ou passez en séances de 30 minutes)

TYPE IONOMAT DATE FABRICATION

SN : *NUMERO DE SERIE* CL: *IIB isolation renforcée sans prise de terre*
PUISSANCE VA *5VA* IPX1 *étanche aux projections d'eau mais ne pas immerger.*

TENSION SECTEUR *230V*
FREQUENCE SECTEUR *50Hz ou 60hz*
CE 1014 ORGANISME NOTIFIE :
INSTITUT ELECTRONIQUE
D'ESSAIS Certificat CE 120101
ISO 13485 : 2003 M 11 32